


## NAVODILO ZA UPORABO TESTA

# CERTEST H. PYLORI CARD

MP-P820001F

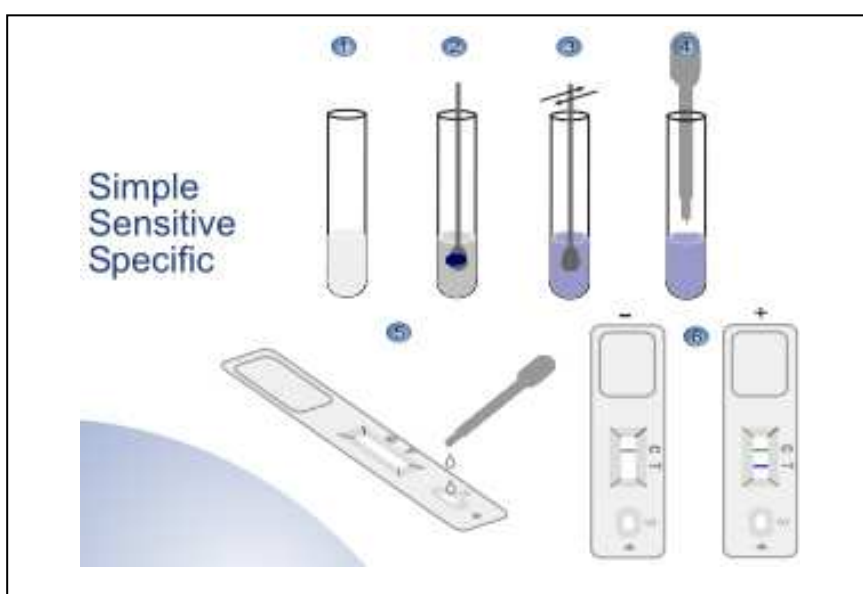


## POSTOPEK

Blato mora biti oddano v čistem zbiralniku in test izveden takoj po odvzetju. Vzorec sme biti skladiščen 1-2 dni pred izvedbo testa, in sicer v hladilniku (2-4°C). Za daljše shranjevanje, najdlje 1 leto, mora biti vzorec zamrznjen na -20°C. Pred testom mora biti odmrznjen in mora doseči sobno temperaturo.

### Prilava vzorca:

Odvijte čep epruvetke in s palčko odzemi cca. 250mg vzorca. Zaprite epruvetko in jo premešajte tako, da bo vzorec dobro disperziran v diluentu.

Testno kaseto pripravite na delovno mizo. Odlomite zgornji vrh epruvetke in dodajte natančno 4 kapljice v testno luknjo.

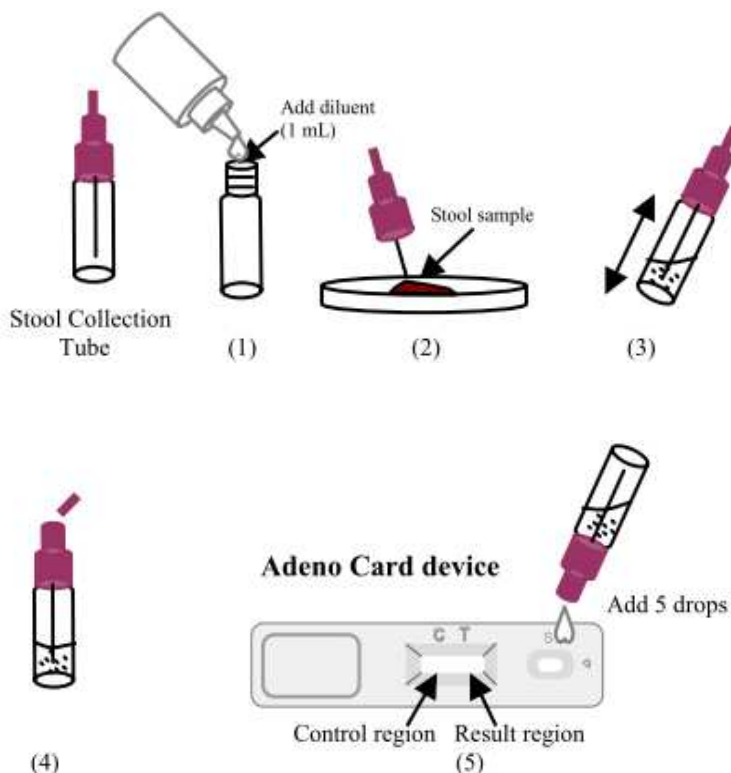

## INTERPRETACIJA REZULTATOV

**BRANJE REZULTATOV:** po 10-ih minutah.

### 1. Pozitivni rezultat:


V testnem okencu se pojavita OBE barvni liniji (T-modra in C-zelena).

### 2. Negativen rezultat:

V testnem okencu se pojavi samo zelena linija – C .

### 3. Neveljaven – nepravilen rezultat:

V testnem okencu se ne izriše kontrolna linija C, oziroma se izriše le modra T linija, zato priporočamo ponovitev testa, saj je razlog za nepravilen rezultat lahko nepravilno izvajanje testa, premajhna količina vzorca ali determiniranost le tega.

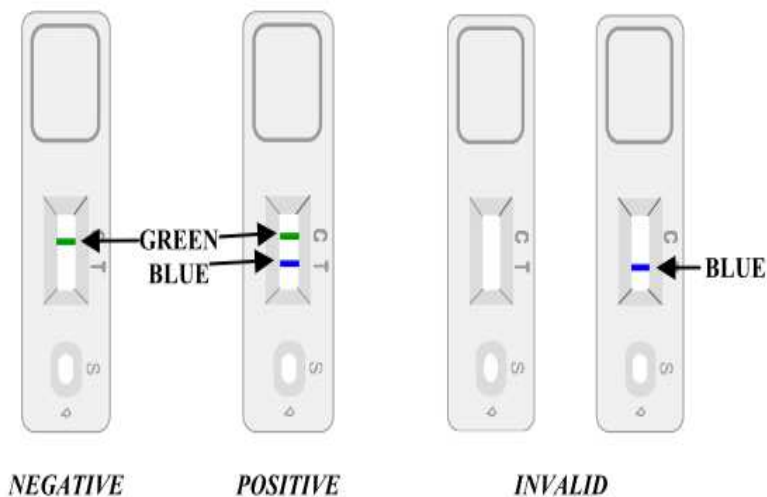

Priporočamo dodatno uporabo originalnih navodil.

**Mikro+Polo Servis**

**Rešujemo težave.**



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### **DEJAVNOSTI SERVISA:**

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### **Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!**

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**