


## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# ELEKTROKOVINA NEGATOSKOP NGS 204-15

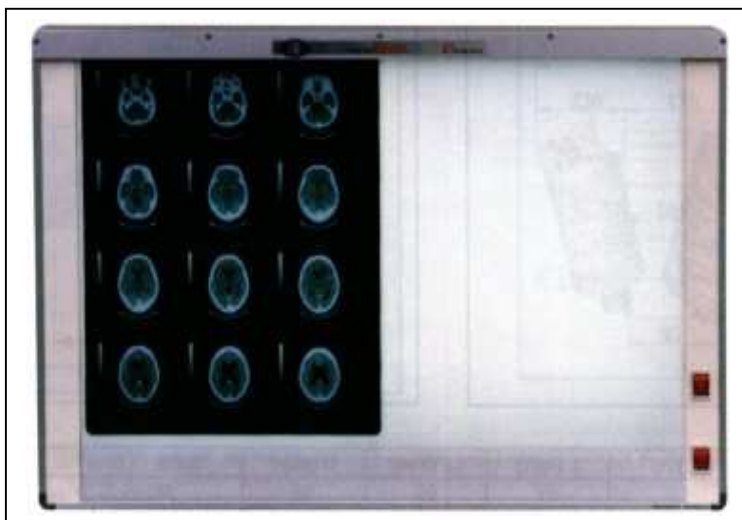

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

**Uporaba:** Negatoskop se uporablja za opazovanje in branje rentgenskih posnetkov. Zaščita - IP20 (IEC).

**Izvedba:** Sestavljen je iz aluminijastih profilov, ki so povezani z nosilnimi kovinskimi kotniki (tlačno lita zlitina). Profil je brezbarvno eloksiran, kotniki so kovinske barve (kromirani). Flouroscentna svetlobna telesa, ki so v notranjosti kovinskega ohišja, so razvrščena tako, da je svetlobno polje enakomerno osvetljeno po vsej površini. Svetlobno polje je iz opalnega akrilnega stekla. Letev, ki je na zgornjem delu naprave, ima vpenjalni sistem, ki vpne film, ko ga pritisnemo ob steklu navzgor. Film snamemo s potegom navzdol. Negatoskop je opremljen s stikalom za vklop-izklop in s priključnim kablom.

**Montaža:** Negatoskop je predviden za montažo na steno s pomočjo zidnih vložkov.

Tip	Izvedba	Moč (W)	Zunanje dimenzije (mm)			Vidno polje	Masa (kg)	Šifra
			D	V	G			
NGS 104-15		4 x 15	468	520	97	356 x 424	7	
NGS 108-15		8 x 15	826	520	97	714 x 424	13	
NGS 204-15		8 x 15	826	520	97	2x (356x424)	13	
NGS 112-15		12 x 15	1180	520	97	1068 x 424	17	
NGS 304-15		12 x 15	1180	520	97	3x (356x424)	17	



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**