

NAVODILO ZA UPORABO TESTA

INNOVACON FLH-U102

Ultra ovulacijski testi (urin)

AC-FLH-U102



innovacon[™]

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

KAZALO

UVOD.....	2
SHRANJEVANJE IN STABILNOST.....	2
ZBIRANJE VZORCA IN PRIPRAVA NA TESTIRANJE.....	2
MATERIAL.....	2
NAVODILO ZA DELO.....	3
NAPOTKI ZA UPORABO.....	4
INTERPRETIRANJE REZULTATOV.....	4
KONTROLA KVALITETE IN OMEJITVE UPORABE.....	5
POMEN SIMBOLOV.....	5
Servis Mikro + Polo.....	6

UVOD

Hitra, v enem koraku kvalitetno določanje LH hormona v urinu. Za profesionalno in vitro diagnostično uporabo. Je imunokromatografski test za kvalitativno določanje LH hormona v krvi, ki pomaga predvideti čas ovulacije in najverjetnejši čas plodnosti. Vzpon LH hormona odkrije v urinu in signalizira, da se bo ovulacija najverjetneje odvijala v naslednjih 24-36 urah.

Varnostno opozorilo

- Le za profesionalno in vitro diagnostično uporabo. Ne uporabljati po poteku datuma.
- Do uporabe naj test ostane zapečaten v originalni embalaži.
- Ne jej, pij ali kadi v prostoru, kjer se uporablja naprava.
- Ne uporabljaj testa, če je embalaža poškodovana.
- S testom ravnaj, kot bi vseboval infektivne povzročitelje. Upoštevajte vpeljane procedure v izogib mikrobiološkim tveganjem in sledite standardiziranim proceduram za pravilno odstranitev vzorca.
- Vlaga in temperatura lahko bistveno vplivata na rezultate.

SHRANJEVANJE IN STABILNOST

Test shranjujte v originalni embalaži na sobni temperaturi ali v hladilniku (2-30° C).

Test mora ostati v originalni embalaži do uporabe. Ne zamrzujte testa. Ne uporabljajte testa po preteku datuma veljavnosti, ki je natisnjen na embalaži.

ZBIRANJE VZORCA IN PRIPRAVA NA TESTIRANJE

- Za zbiranje urina določite najbolj optimalen čas. Za najboljše rezultate, zberite urin vsak dan ob približno enakem času. Nekatere ženske so ugotovile, da je najboljši čas za zbiranje urina po poldnevu. Ne uporabljajte vzorca prvega jutranjega urina.
- Omejite vhodne tekočine na 2 uri pred zbiranjem vzorca.
- Zabeležite datum, dan cikla in uro zbiranja vzorca. Oglejte si TEST RESULT CHART.
- Urin lahko shranite na sobni temperaturi do 8 ur, ali do 24 ur pri temperaturi 2-8° C.

MATERIAL

Kit vsebuje:

1. testna ploščica
2. kapalka
3. navodila za delo v angleškem jeziku

Potrebujemo še: uro, vzorec urina

NAVODILO ZA DELO

Kdaj začeti s testiranjem

Najprej ugotovimo in določimo dolžino / trajanje menstrualnega cikla. To je število dni od prvega dneva menstrualne krvavitve do zadnjega dneva pred začetkom naslednje periode. Nato določimo v naprej štete dneve, po periodi za začetek testiranja. Poiščemo dolžino menstrualnega cikla osebe v prvi vrstici priložene tabele, in odčitamo korespondenčne dneve za štetje v naprej v drugi vrstici tabele. To je število dni po periodi, ko se naj testiranje prične.

Dolžina menstrualnega cikla

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

V naprej šteti dnevi

Končno lahko določimo dan začetka testiranja. Izračun začnemo s štetjem dni, vključno s prvim dnevom zadnje periode ter dodamo v naprej štete dneve po korakih iz prejšnjega odstavka. Tako dobimo dan, ko se testiranje naj zaščen. Kot osnovno vodilo je priporočljivo testirati 1x dnevno 5 dni zaporedoma.

OPOMBA: če obstaja negotovost glede dolžine menstrualnega cikla, pri odčitavanju tabele upoštevajte najkrajši menstrualni cikel (21 dni). V takšnem primeru bo potrebno izvajanje testa več kot 5 dni.

Primer: običajno traja cikel 28 dni. Tabela določa, da je potrebno šteti v naprej 11 dni od zadnje periode. Zadnja perioda se je začela tretjega v mesecu. Začeni z in vključno z 3. , štejemo v naprej 11 dni in pristanemo na datum 13. Zbiranje urina in testiranje se bo začelo 13. v mesecu in se nadaljevalo vse do 17. Natančno si oglejte spodnjo tabelo – koledar opisanega primera.

Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
	1	2	(3)	4	5	6
7	8	9	10	11	12	<13>
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

() --- prvi dan zadnje periode


< > -- začetek testiranja

NAPOTKI ZA UPORABO

Pred uporabo test in vzorec pripraviti tako, da doseže sobno temperaturo (15-30° C).

1. Določite datum začetka testiranja.
2. Odprite originalno embalažo šele, ko naprava doseže sobno temperaturo. Odstranite zaščitno folijo. Test po odprtju folije uporabi takoj. Najboljši rezultati so, če test opravimo znotraj ene ure.
3. Ploščico položi na čisto in ravno površino. Z navpično usmerjeno kapalko prenesi 3 polne kapljice urina (približno 100 μ l) v testno okence na ploščici (s) in vključi uro. Poskušajte se izogniti pojavu zračnih mehurčkov v nanesenem vzorcu.
4. Počakajte tako dolgo, da se v testnem okencu obarvajo črte. Rezultate odčitajte po 5 minutah. Ne odčitavajte rezultatov po preteklih 10 minutah!

Primerjaj spodnji opis s sliko:

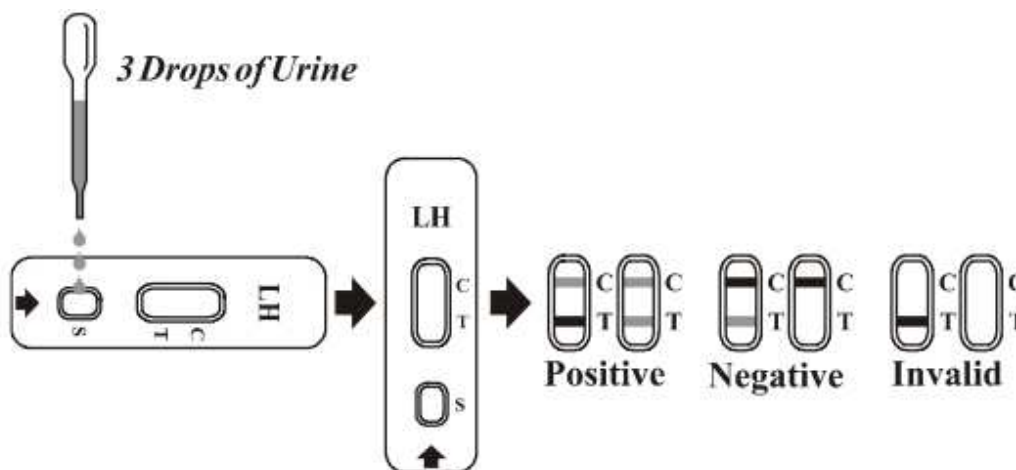

INTERPRETIRANJE REZULTATOV

POZITIVNO: vidni sta dve črti in črta v testnem okencu T je enake ali temnejše barve kot črta v kontrolnem okencu C. To pomeni, da bo ovulacija najverjetneje nastopila v naslednjih 24-36 urah.

NEGATIVNO: vidni sta dve črti, vendar je črta v testnem okencu T svetlejša kot črta v kontrolnem okencu C, ali črte pa črte v testnem okencu T sploh ni. To pomeni, da ni prisotnosti LH hormona.

NEVELJAVEN: kontrolna črta se ne pojavi. Najverjetnejši razlog napake je nezadostna količina vzorca ali nepravilna izvedba procesa testiranja. Preglejte proces testiranja in ponovite test z novo testno napravo. Če se težave ponovijo, nemudoma prekinite uporabo testnega kompleta in kontaktirajte distributerja.

KONTROLA KVALITETE IN OMEJITVE UPORABE

Linija C je notranja procesna kontrola.

Test se uporablja samo v in vitro diagnostiki in je namenjen izključno profesionalni uporabi.









Ta test ne sme biti uporabljen kot oblika nadzora poroda.

Na testne rezultate ne vplivajo protibolečinska sredstva, antibiotiki in druge običajne vrste zdravil. Zdravila, ki vsebujejo hCG ali LH lahko vplivajo na rezultate testa, zato odsvetujemo uživanje le-teh med izvajanjem testa LH. Test ne bo deloval pravilno, če ga boste uporabljali v času nosečnosti, menopavze, ali če uživajte kontracepcijska sredstva.

Tester naj ne bo na doseg otrokom.

Priporočamo dodatno uporabo originalnih navodil.

POMEN SIMBOLOV

	Pozor! Glej navodila za uporabo		Uporaba pri
	Samo za in vitro diagnostično uporabo		Razdelna številka
	Hraniti pri 2-30° C		Pooblaščen predstavnik
	Testi v okviru opreme		Ne uporabiti ponovno
		REF	Katalog

Servis Mikro + Polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**