

NAVODILO ZA UPORABO

INNOVACON IHP-402

Hitri test za določevanje *H. pylori* v krvi

?? IHP-402



innovacon

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

KAZALO

NAVODILO ZA DELO.....	2
INTERPRETACIJA REZULTATOV.....	4
EKSTERNA KONTROLA KVALITETE TESTA.....	4
POMEN SIMBOLOV.....	4
Servis Mikro + Polo.....	5

Quick-Check H. Pylori Test Devuce (serum, plazma) je imunokromatografski test za kvalitetno določanje infekcije s H. Pylori.

Kit vsebuje:

1. testne ploščice
2. pufer
3. kapalke
4. pozitivno kontrolo
5. negativno kontrolo
6. navodilo za delo v angleškem jeziku

Potrebujemo še: material za odvzem vzorca (npr. polne krvi iz prsta ali vene), centrifugo, uro.

NAVODILO ZA DELO

Do datuma uporabe kit shranjujte v originalni embalaži v hladilniku oz. na sobni temperaturi (2-30° C)


1. Testi ne smejo biti izpostavljeni močni sončni svetlobi in ne smejo zmrzniti. Testa ne uporabljajte po poteku datuma uporabe.
2. Vzorci polne krvi smejo biti skladiščeni 3 dni v hladilniku pri 2-8° C ali daljše obdobje pri -20° C.
3. Pred uporabo naj se test in vzorec segrejeta na sobno temperaturo (15-30° C).
4. Testno ploščico položite na ravno površino in jo po odprtju iz folije takoj uporabite. Navpično nad testno ploščico s kapalko kapnemo 2 kapljice vzorca (serum ali plazma) v zato pripravljeno mesto (S) in dodajte 1 kapljico pufra.
5. Počakajte 10 minut, da se v testnem okencu pokažejo barvne linije in odčitajte rezultat.

H. pylori Rapid Test Device (IHP-402) Whole Blood/Serum/Plasma

Procedure Read Procedure before running test, Refer to Package Insert for details.


Place Test Device on a clean, dry, level surface.

Venipuncture Whole Blood
Add **2** Drops of Blood (approximately 50 uL), then **1** Drop of Buffer to the Sample Well




OR

Fingerstick Whole Blood
Add **1** Capillary Tube of Blood (approximately 50 uL), then **1** Drop of Buffer to the Sample Well




OR


Serum /Plasma
Add **2** Drops of Serum or Plasma (approximately 50 uL), then **1** Drop of Buffer to the Sample Well




Interpretation of Results

Read result at **10** minutes.
Do not move Test Device until ready to read.






Positive
Any shade of red in the test region (T) should be considered positive.



Negative



Invalid

No:R017575 Ver:01

INTERPRETACIJA REZULTATOV

Pozitiven rezultat:

V testnem okencu se pojavita dve barvni liniji (T in C). T linija je lahko različno močna, vendar vsaka pomeni pozitiven rezultat.

Negativen rezultat:

V testnem okencu se pojavi samo ena linija – C. Linija C je notranja procesna kontrola. V kitu sta tudi eksterna + in – kontrola. Priporočamo uporabo le-teh enkrat na kit.

Neveljaven rezultat:

V testnem okencu se ne izriše kontrolna linija C. Verjetno je prišlo do napak v postopku priprave testa, zato priporočamo ponovitev testa. Če dobite podoben rezultat, se obrnite na distributerja.










EKSTERNA KONTROLA KVALITETE TESTA

1. Dodajte 1 polno kapljico + ali – kontrole v testno okence (S) na testni ploščici. Nadaljujte s korakom 3 po navodilih za delo.
2. Počakajte 10 minut, da se v testnem okencu pokažejo barvne linije in odčitajte rezultat.

Če kontrola ne prikaže pričakovanih rezultatov, ne uporabljajte testov in kontaktirajte distributerja. Testi so uporabni samo za *in vitro* diagnostiko in je namenjena izključno za profesionalno uporabo.

Priporočamo dodatno uporabo originalnih navodil.

POMEN SIMBOLOV

	Pozor! Glej navodila za uporabo		Uporaba pri
	Samo za <i>in vitro</i> diagnostično uporabo		Razdelna številka
	Hraniti pri 2-30°C		Pooblaščen predstavnik
	Testi v okviru opreme		Ne uporabiti ponovno
			Katalog

Servis Mikro + Polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**