

NAVODILO ZA UPORABO TESTA

PROPPER SERACULT Fecal Occult Blood Test

PP-371001



propper

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Seracult test je hiter in enostaven za uporabo pri določevanju krvi v blatu. Uporablja se za kvalitativno profesionalno določitev krvi v blati gastrodestinalnega trakta.

POVZETEK

Seracult hitri test je namenjen za rutinsko sistematsko preiskavo telesa, za rutinsko bolnišnično preiskavo in kot presejalni test odkrivanja kolorektalnega raka.

OPOZORILA

- Samo za strokovno in vitro diagnostično uporabo.
- Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu, odtisnjenem na embalaži.
- Testna ploščica mora biti v škatli do začetka uporabe.
- Vsi vzorci so potencialno nevarni, zato svetujemo, da z njimi ravnate kot s kožnimi snovmi.

SHRANJEVANJE IN STABILNOST

- Test shranjujte v originalni embalaži pri sobni temperaturi med 15-30°C.
- Testna ploščica je stabilna do datuma, odtisnjenega na embalaži.
- Testa ne izpostavljamo vročini, soncu, fluorescentni svetlobi in ultravijoličnemu sevanju. Modra svetloba lahko povzroči porumenitev testa.
- Testa ne zmrzujete.
- Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu odtisnjenem na embalaži.
- Ko enkrat odprete embalažo, so preostali testi uporabni samo še do 90 dni.

PRIPRAVA PACIENTA NA TESTIRANJE

Pacient naj jé:

- Priporočeno je zaužitje zelenjave kot so špinača, koruza, zelena solata.
- Pacient na jé vlakninasto hrano kot so žitni otrobi, kikiriki in pokovka.
- Dovoljeno je sadje kot so jabolka, grozdje, koščičarji.

Pacient naj ne zaužije:

- Meso naj ne jé dva dni pred testiranjem in tekom testiranja. Zaužitje surovega ali slabo pečenega mesa lahko dá napačen rezultat.
- Zelenjave kot so: cvetača, rdeča redkev, repe, brokoli, melona.
- Na dan lahko zaužije do 250 mg C-vitamina.
- Dodatek k prehrani, ki je bogato z železom.
- Aspirin in druga zdravila, katera lahko povzročijo draženje črevesja.

Opomba:

Če pacient mora jemati zdravila tekom testiranja, naj se o tem pogovori s svojim zdravnikom.

MATERIAL

Priloženi material za testiranje

- test
- palčka za nanos vzorca
- razvijalec
- navodila za uporabo

Dodatno potreben material

- posodica za vzorec blata
- ura



NAVODILA ZA UPORABO

Pred začetkom natančno preberite navodila za uporabo.

1. Na prvo stran testa napišite podatke o pacientu, laboratoriju.
2. Test položite na ravno, vodoravno podlago in ga odprite. S palčko za nanos vzorca nanesite tanko plast vzorca v prvo okence gvajak impregniranega papirja.
3. Odpremo in na zadnjo stran testa kanemo 2 (dve) kapljici razvijalca.
4. Počakajte. **Rezultat odčitajte po 60-60 sekundah po aplikaciji razvijalca.**
5. V kolikor odvzet vzorec vsebuje okultno kri, hemoglobin iz krvi reagira z razvijalcem in skupaj z gvajak papirjem dá modro barvo.



Slide identification

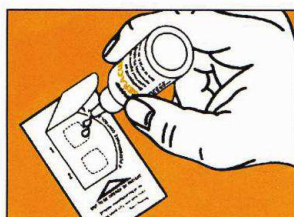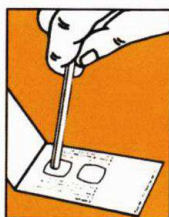

Slide Development



ODČITAVANJE REZULTATA



Positive Test Result



Positive Test Result



Negative Test Result



Performance Control Area

POZITIVEN REZULTAT

Oba okenca pomodrita. Vsak odtенок modre barve po 60 sekundah je pokazatelj krvi v blatu.

NEGATIVEN REZULTAT

Okenca ne pomodrita. Odsotnost modre barve je pokazatelj odsotnosti krvi v blatu.

NEVELJAVEN REZULTAT

Rezultat je neveljaven, če se ne pojavi modra lisa v kontrolnem področju.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**