


NAVODILO ZA UPORABO TESTA

QUIDEL QUICKVUE H. PYLORI gII test BM-97018

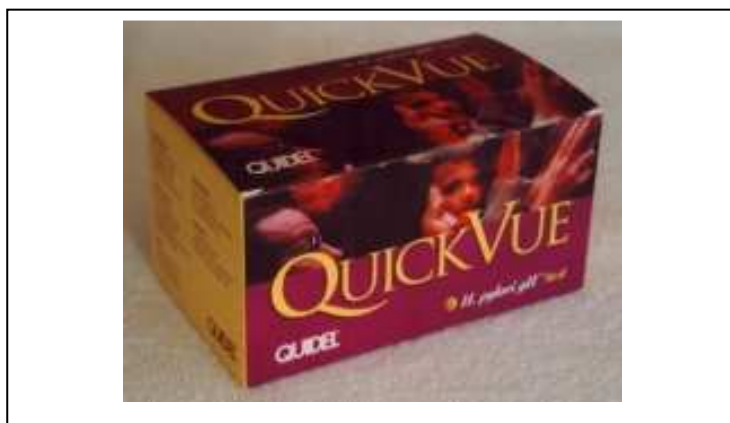

Uporaba le za *in vitro* diagnostične preiskave.

Vsebine kita ne uporabljajte po datumu, odtisnjenem na embalaži.


Shranjevati na sobni temperaturi 15-30°C in ne izpostavljati neposredni sončni svetlobi.

Ne zamrzovati.

Vzorci polne krvi smejo biti skladiščeni do 4 ure na sobni temperaturi, v hladilniku (2-8°C) pa tudi do 72 ur pred testiranjem.

NAVODILO ZA DELO

Postopek:

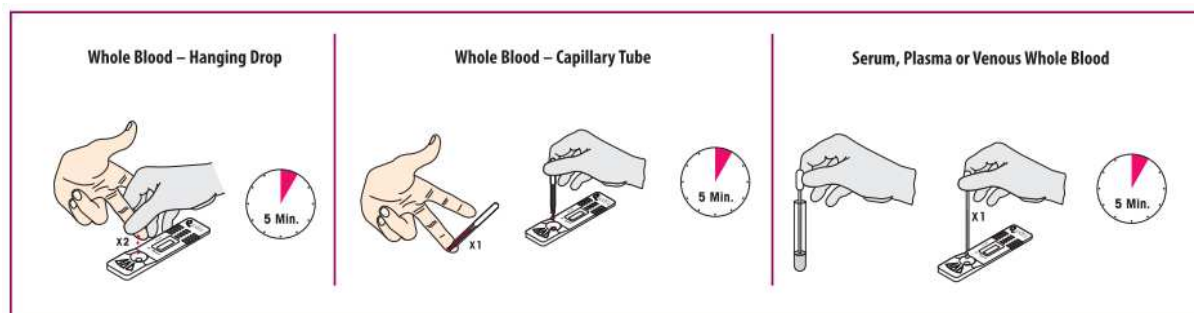

Pred začetkom preiskave morajo vsi reagenti doseči sobno temperaturo.

Opomba: Premalo vzorca lahko privede do nepravilnih rezultatov.

Testno kaseto vzemite iz zaščitne folije in jo položite na čisto, suho in ravno površino



1. S kapalko dodajte kapljo NEKOAGULIRANE krvi na testno luknjo na kaseti.
V času poteka testa in čakanja na odčitavanje kasete ne premikajte.

Ali

2. S kapalko odmerite kapljo POLNO kri iz prsta v testno luknjo na kaseti.
V času poteka testa in čakanja na odčitavanje kasete ne premikajte.

Ali

3. Direktno iz prsta nakaplajte 2 kapljici POLNE krvi na testno luknjo na kaseti.
Pri tem pazite, da se ne dotikate testne luknje s prstom!
V času poteka testa in čakanja na odčitavanje kasete ne premikajte.

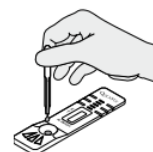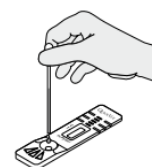

INTERPRETACIJA REZULTATOV

Primerjaj spodnji opis s sliko:

BRANJE REZULTATOV: po 5-ih minutah. Nekateri pozitivni rezultati so vidni tudi že prej.



1. Pozitivni rezultat:

V testnem okencu se pojavita dve barvni liniji (T-rdeča in C-modra) – prisotnost H.pylori specifičnih IgG protiteles.

2. Negativen rezultat:

V testnem okencu se pojavi samo modra linija – C – odsotnost H.pylori specifičnih IgG protiteles.

3. Neveljaven – nepravilen rezultat:

V testnem okencu se ne izriše kontrolna linija C v času 5-ih minut, zato priporočamo ponovitev testa.

OMEJITVE

Pozitivni rezultat kaže samo na prisotnost specifičnih IgG protiteles na H.pylori, toda ne kaže na aktivno oz. neaktivno infekcijo!

Priporočamo dodatno uporabo originalnih navodil.

MIKRO+POLO SERVIS



... rešujemo težave

Kolektiv Mikro+Polo servisa sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, hi-tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela v Vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

- INSTALACIJE,
- REDNO IN IZREDNO VZDRŽEVANJE,
- DEINSTALACIJE ODSLUŽENIH APARATUR IN OPREME,
- DEMONSTRACIJE DELOVANJA OPREME,
- NASTAVITVE PARAMETROV IN MODIFIKACIJE,
- KALIBRACIJE




Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo. V sklopu servisnega oddelka Vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER**
na tel. št.: **+386 2 614 33 57**,
ali nam pišite na e-mail: service@mikro-polo.si

Podatki o podjetju: **Mikro + Polo d.o.o.**
Zagrebška cesta 22
2000 Maribor, Slovenija

Naši klicni centri:

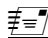			
Centrala	+386 2 614 33 00	+386 2 614 33 20	info@mikro-polo.si
Prodaja	+386 2 614 33 52	+386 2 614 33 20	prodaja@mikro-polo.si
Nabava	+386 2 614 33 60	+386 2 614 33 29	narocilo@mikro-polo.si
Inženiring	+386 2 614 32 00	+386 2 614 32 04	lab.ing@mikro-polo.si
Logistika	+386 2 614 33 06	+386 2 614 33 29	expedit@mikro-polo.si