

NAVODILO ZA UPORABO TESTA

QUIK-CHECK MONO Mononucleosis Rapid Test Device

Izvajanje kontrole kvalitete
za test infekcijska mononukleozna

REF IMO-402



UVOD

Quik-Check Mononucleosis Rapid Test Device (polna kri, serum, plazma) je imunokromatografski test za kvalitativno določanje infekcijske mononukleoze (IM).

Kit vsebuje:

1. testne ploščice
2. pufer
3. kapalke
4. pozitivno kontrolo
5. negativno kontrolo
6. navodila za delo v angleškem jeziku

Potrebujemo še: uro, material za odvzem vzorca (npr. polne krvi iz prsta ali vene), centrifugo.

NAVODILO ZA DELO

1. Do uporabe kit shranjujte v originalni embalaži pri sobni temperaturi ali v hladilniku (2-30°C).
2. Pred uporabo test pripraviti tako, da doseže sobno temperaturo.
3. Test po odprtju folije uporabi takoj. Najboljši rezultati so, če test opravimo znotraj ene ure.
4. ploščico položi na čisto in ravno površino.

Venska polna kri


Z navpično usmerjeno kapalko prenesi 2 kapljici polne krvi v testno okence na ploščici (S). Nato dodaj še 1 kapljico pufera in vključi uro (slika 2).

Polna kri iz prsta

S kapilarno cevko prenesi 50µl polne krvi iz prsta v testno okence na ploščici (S). Nato dodaj še 1 kapljico pufera in vključi uro (slika 3).

Serum ali plazma

Z navpično usmerjeno kapalko prenesi 1 kapljico seruma ali plazme v testno okence na ploščici (S). Nato dodaj še 1 kapljico pufera in vključi uro (slika 1).

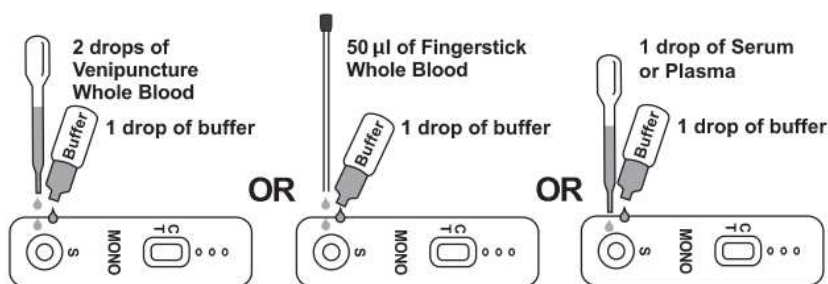

Slike:

1


2

3

5. Počakaj 5 min, da se v testnem okencu pokažejo barvne linije. Ne odčitavaj rezultatov po 10 minutah!

INTERPRETACIJA REZULTATOV

Primerjaj spodnji opis s sliko:

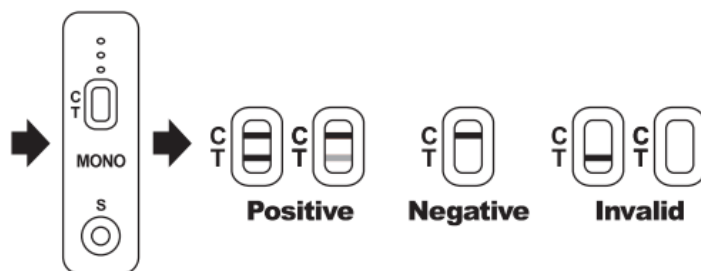

1. Pozitivni rezultat:

V testnem okencu se pojavita dve barvni liniji (T in C). T linija je lahko različno močna, vendar vsaka pomeni pozitiven rezultat.

2. Negativen rezultat:

V testnem okencu se pojavi samo ena linija – C.

3. Neveljaven rezultat:

V testnem okencu se ne izriše kontrolna linija C. verjetno je prišlo do napak v postopku priprave testa, zato priporočamo ponovitev testa. Če problem še vedno ostaja, se obrnite na distributerja.

Linija C je notranja procesna kontrola. V kitu sta tudi eksterna + in – kontrola. Nujno uporabo priporočamo 1x/kit.

EKSTERNA KONTROLA KVALITETE TESTA

1. Dodaj 1 polno kapljico + ali – kontrole v testno okence (S) na tablici. Nato dodaj 1 kapljico pufru. Nadaljuj s korakom 3 navodil za delo.
2. Počakaj 5 minut, da se v testnem okencu pokažejo barvne linije. Ne odčitavaj rezultatov po 10 minutah!

Če kontrola ne prikaže pričakovanih rezultatov, ne uporabljajte testov in kontaktirajte distributerja. Test se uporablja samo v in vitro diagnostiki in je namenjen izključno profesionalni uporabi.

Priporočamo dodatno uporabo originalnih navodil.

POMEN SIMBOLOV

	Pozor! Glej navodila za uporabo		Uporaba pri
	Samo za in vitro diagnostično uporabo		Razdelna številka
	Hraniti pri 2-30°C		Pooblaščen predstavnik
	Testi v okviru opreme		Ne uporabiti ponovno
			Katalog

Servis Mikro + Polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**